



HANS MÜLLER

## Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

**Hersteller:** ResMed

**Gerätetyp:** AirSense S10 Serie

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Die Therapie muss durch Drücken der Start/Stop Taste begonnen werden.
- Nachdem das Gerät direkt wieder ausgeschaltet wird, ist die Gesamtnutzung ganz unten im Schlafbericht erkennbar.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH  
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

[info@hmp-medizintechnik.de](mailto:info@hmp-medizintechnik.de) | [hmp-medizintechnik.de](http://hmp-medizintechnik.de)