

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen



Hersteller: Philips Respironics

Gerätetyp: BiPAP A 30 / A 40

- Schalten Sie das Gerät an.
- Drücken Sie eine beliebige Taste um das Display zu aktivieren.
- Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie die obere Taste der Aufwärts- und Abwärtstaste.
- Navigieren Sie mit der Aufwärts- und Abwärtstaste soweit nach unten, bis der Menüpunkt „Informationen“ erscheint.
- Betätigen Sie den rechten Knopf unter der Anzeige „Auswählen“ um in das Untermenü zu gelangen.
- Navigieren Sie mit der Aufwärts- und Abwärtstaste so lange nach unten, bis Sie zum Menüpunkt „Therapiestunden“ gelangen.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.