



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: Hoffrichter

Gerätetyp: Carat I / II Pro

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Drücken Sie entweder auf dem Display den Menüpunkt „System“ oder navigieren mit dem Multifunktionsknopf (MFK) dorthin.
- Wischen Sie entweder auf dem Display oder navigieren Sie mit dem MFK zum Menüpunkt „Beatmungsstd. seit Reset“.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ableседatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de