



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: Philips Respironics

Gerätetyp: Dorma 400 / 500

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Navigieren Sie mit dem Bedienknopf bis zum Menüpunkt „Info“.
- Drücken Sie den Bedienknopf und navigieren Sie bis zum Menüpunkt „Abfrage“.
- Drücken Sie den Bedienknopf erneut und die Therapiestunden werden angezeigt.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de