



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: Philips Respironics

Gerätetyp: Dreamstation Serie

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Navigieren Sie mit dem Drehknopf bis zum Menüpunkt „Mein Betreuer“.
- Drücken Sie den Drehknopf und navigieren Sie weiter bis zum Menüpunkt „Abfrage“.
- Drücken Sie den Drehknopf erneut und die Therapiestunden werden angezeigt.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hinweis:

Sollte der Menüpunkt „Mein Betreuer“ bei Ihnen nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter 0911 / 955 288 0 oder an info@hmp-medizintechnik.de

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de