



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: Löwenstein

Gerätetyp: LUISA

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie im Display den Menüpunkt „Report“.
- Drücken Sie danach den Menüpunkt „Gerätenutzung“.
- Lesen Sie hier die Nutzungsdauer des Gerätes ab.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ableседatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de