



HANS MÜLLER

## Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

**Hersteller:** Löwenstein

**Gerätetyp:** Prisma Smart / Soft

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Drücken Sie die Menütaste (erste Taste rechts neben dem Ein- und Ausschaltknopf) auf dem Display.
- Um das Infomenü „i“ zu öffnen, drücken Sie die Minustaste.
- Nach Betätigen der Taste, erscheinen auf dem Display alle Werte.
- Die Gesamtbetriebsstunden befinden sich in der ersten Zeile.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH  
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

[info@hmp-medizintechnik.de](mailto:info@hmp-medizintechnik.de) | [hmp-medizintechnik.de](http://hmp-medizintechnik.de)