



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: Löwenstein

Gerätetyp: Prisma Vent

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Drücken Sie die Auswahl Taste unterhalb des Menüpunktes „Report“
- Drehen Sie den Drehknopf so lange nach rechts, bis der Menüpunkt „Gerätenutzung“ grün hinterlegt ist
- Drücken Sie den Drehknopf, um die Betriebszeit abzulesen (Nutzungsdauer des Gerätes)
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de