



HANS MÜLLER

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen

Hersteller: ResMed

Gerätetyp: S9 Serie

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Drücken Sie die Info- und Setup-Taste gleichzeitig und halten diese für ca. 4 Sekunden gedrückt.
- Im Display ist auf der linken Seite das Menüfeld „Schlafqualität“ ausgewählt.
- Navigieren Sie mit dem Bediencontroller zum 2. Menüfeld „Schlafbericht“ und drücken Sie den Bediencontroller.
- Drücken Sie den Bediencontroller 1x erneut und stellen Sie den Zeitraum auf 1 Jahr.
- Die Nutzungsstunden können in der 5. Zeile abgelesen werden.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

info@hmp-medizintechnik.de | hmp-medizintechnik.de