

Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen



Hersteller: DeVilbriss

Gerätetyp: SleepCube

- Entfernen Sie zu aller erst den Maskenschlauch vom Gerät.
- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Starten Sie das Geräte mit dem ON/OFF Knopf.
- Drücken Sie den linken Knopf oberhalb des ON/OFF Knopfes zügig 5x hintereinander, bis Sie zum Menüpunkt „Anwenderstunden“ gelangen.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ableседatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.