

## Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen



HANS MÜLLER

**Hersteller:** ResMed

**Gerätetyp:** Stellar 100 / 150

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie die Informationstaste „i“ so lange nacheinander, bis Sie zum Menüpunkt „Nutzung“ (Seite 10/12) gelangen.
- Die Nutzungsdauer befindet sich rechts unten.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ablesedatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH  
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

[info@hmp-medizintechnik.de](mailto:info@hmp-medizintechnik.de) | [hmp-medizintechnik.de](http://hmp-medizintechnik.de)