

## Therapiestunden / Betriebsstunden ablesen



HANS MÜLLER

**Hersteller:** Philips Respironics

**Gerätetyp:** Rem Star CPAP / Auto, Somnia 3, Phönix, C-Flex  
A-Flex, BiPAP Auto SV adv

- Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
- Navigieren Sie mit dem Bedienknopf bis zum Menüpunkt „Info“.
- Drücken Sie den Bedienknopf und navigieren Sie bis zum Menüpunkt „Abfrage“.
- Drücken Sie den Bedienknopf erneut und die Therapiestunden werden angezeigt.
- Die **angezeigten Stunden** und das **Ableседatum** in das beiliegende Formular in die markierten Felder eintragen.

Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH  
Schnieglinger Straße 162 | 90425 Nürnberg | T 0911 955288-0

[info@hmp-medizintechnik.de](mailto:info@hmp-medizintechnik.de) | [hmp-medizintechnik.de](http://hmp-medizintechnik.de)